



ProtectLine

Catálogo de productos

Nuestra misión es responder a las necesidades, involucrándonos al máximo en el diseño y desarrollo de nuestros productos, ofreciéndote seguridad mediante el cumplimiento de todas las normativas y certificaciones aplicables.

Nuestra visión es ser una empresa de referencia en el sector sanitario, ofreciendo soluciones que faciliten la labor de los profesionales y mejoren la calidad de vida de los clientes.



Guantes de Examen Guantes de Nitrilo

Examination gloves
Nitrile gloves

Los guantes de examen son adecuados en entornos de trabajo donde existe un posible contacto con fluidos corporales, microorganismos y productos químicos. No contienen látex. No contienen polvo. Ofrecen una gran flexibilidad, tacto, resistencia al desgarro y a los productos químicos.

Libres de Polvo
Powder Free

Libres de Latex
Latex Free

Size	Minimum Length (mm)	Palm Width (mm)
S	240	80 ±10
M	240	95 ±10
L	240	110 ±10
XL	240	≥1 ±10





Guantes de Examen Guantes de Nitrilo

Examination gloves
Nitrile gloves



Información Técnica:

Nombre de producto: Guantes de Nitrilo. Guantes de Examen. Guantes biodegradables.

Clasificación: Producto Sanitario Clase I, Regla I, ANEXO VIII. Equipo de protección individual, Categoría III. ANEXO I.

Estándar: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Evaluación de conformidad: ANEXO II Reglamento (UE) 2017/745 y ANEXO V (Módulo B) y VII (Módulo C2) del Reglamento (UE) 2016/425.

Technical Data:

Product name: Nitrile gloves. Examination gloves. Biodegradable gloves.

Classification: Class I Medical Device, Rule I, ANNEX VIII. Personal Protective Equipment, Category III, ANNEX I.

Standard: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Conformity assessment: ANNEX II Regulation (UE) 2017/745 y ANNEX V (Module B) and VII (Module C2) del Regulation (UE) 2016/425.

CLASIFICACIÓN:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B
40% Sodium HYDROXIDE (K)
30% Hydrogen Peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)

EN ISO 374-5:2016

Protección frente a Bacterias y Hongos
Protección frente a Virus

CLASSIFICATION:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B
40% Sodium HYDROXIDE (K)
30% Hydrogen Peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)

EN ISO 374-5:2016

Protection against Bacteria and Fungi
Protection against Viruses

LEVEL

6
3
5

EN ISO 374-4:2019 % DEGRADACIÓN

8,2
7,3
0,6

Pass
Pass





Guantes de Examen

Guantes de Nitrilo

Examination gloves
Nitrile gloves

REF G001

Características del embalaje

Talla S

CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-S-14
Dimensiones:

Talla M

CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-M-14
Dimensiones:

Talla L

CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-L-14
Dimensiones:

Talla XL

CANTIDAD: Caja 100 uds.
SKU: NG-INT-100-XL-14
Dimensiones:

Importado y distribuido por:

DEVELOPING BUSINESS TRADING, S.L.

Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046, Madrid – España

Número de Licencia: 8188 – PS



Guantes de Examen

Guantes de Nitrilo

REF G001

Examination gloves

Nitrile gloves

Indicaciones de uso:

Los guantes de examen son adecuados en entornos de trabajo donde existe un posible contacto con fluidos corporales, microorganismos y productos químicos. No contienen látex. No contienen polvo. Ofrecen una gran flexibilidad, tacto, resistencia al desgarro y a los productos químicos.

Instrucciones de uso:

Saque el guante de la caja.

Una vez que el primer guante de examen se haya extraído, tenga cuidado de tocar únicamente la superficie restringida del guante correspondiente a la muñeca (en el borde superior del puño).

Póngase el primer guante de examen desde este punto de contacto.

Tome el segundo guante con la mano desnuda y toque solo las superficies restringidas del guante correspondiente a la muñeca.

Para evitar tocar la piel del antebrazo con la mano enguantada, gire la superficie externa del guante a colocarse sobre los dedos doblados de la mano enguantada, permitiendo así llevar la segunda mano enguantada.

Una vez puestos los guantes, las manos no deben tocar nada más que no esté definido por las indicaciones y condiciones de uso de los guantes.

Instrucciones de retirada:

Para quitarse los guantes, comience pellizcando uno a la altura de la muñeca, sin tocar la piel del antebrazo con el guante contaminado. Luego, retire el guante de la mano, permitiendo que se le dé la vuelta al guante una vez que se lo haya quitado.

Sosteniendo el guante que se quitó en la mano enguantada, deslice los dedos de la segunda mano sin guante hacia adentro entre el guante y la muñeca. Quite el segundo guante haciéndolo rodar por la mano y sobre el primer guante.

Deseche los guantes que se hayan quitado de acuerdo con los procedimientos y las mejores prácticas de sus instalaciones.

Precauciones:

Los guantes de examen son productos de un solo uso.

Cuando use guantes, no use anillos, u otros adornos y recorte las uñas con suavidad.

Use independientemente de la mano derecha e izquierda, elija guantes adecuados para las especificaciones de su mano.

No lo use si los guantes están contaminados debido a daños en el empaque.

Está estrictamente prohibido irradiar luz directamente luz intensa como la luz solar o los rayos ultravioleta.

Almacenamiento:

El producto debe almacenarse en un ambiente fresco, seco y oscuro sin gases corrosivos.

El producto tiene una vida de 2 años tras su fabricación.

USO MÉDICO

Importado y distribuido por:

DEVELOPING BUSINESS TRADING, S.L.

Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4,

Puerta 8, 28046, Madrid – España

Número de Licencia: 8188 – PS

CE Producto Sanitario
Equipo de Protección Individual
2777