

Ficha técnica Mascarilla **FFP3 - NR** Modelo **FM0203-966**

Mascarilla de protección

≥98% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009 , Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 2163

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP3 NR

Modelo / Especificación: FM0203-966, 20.8cm x 18.5cm


Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

Composición: 43%: tela no tejida, 27% tela fundida por soplado, 30% algodón de aire caliente

Condiciones de almacenamiento: Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

Aviso de alergia: Tela no tejida

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

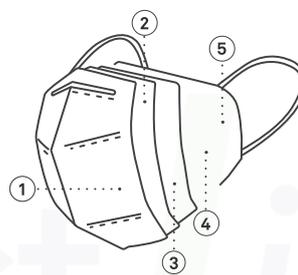

Composición

- 1., 5. : Tela no tejida
- 4. : Algodón de aire caliente
- 2., 3. : Tela fundida por soplado



Máxima humedad relativa



Rango de temperatura

FIRMADO POR

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los equipos NR (No Reutilizable) no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- No estériles.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

IMPORTADOR:

Arsh Consultancy and Skyline S.L. - CIF: B45682283
Import license Nr: 8189-PS
Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046 Madrid, España

FABRICANTE:

Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. "JU"
No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua
Zhejiang. R.P. China

REPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse8, 80807 Munich, Alemania

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CÓDIGO DE BARRAS

CANTIDAD: 1 ud/bolsa
SKU: FM-FFP3-B-01-PL-9
DIMENSIÓN: 165 x 140 mm



CANTIDAD: 20 uds (bolsas individuales)/paquete
SKU: FM-FFP3-B-20-PL-9
DIMENSIÓN: 170 x 145 x 106 mm



Caja máster

CANTIDAD: 20 uds/paquete, 40 paquetes/caja
TOTAL CANTIDAD: 800 unidades
DIMENSIÓN: 735 x 450 x 375 mm

