

## Ficha técnica Mascarilla FFP2 NR Modelo MZC-KZ

Mascarilla de protección

≥94% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 0370

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

**Nombre de producto:** Mascarilla de filtración

**Clasificación:** FFP2 NR

**Modelo / Especificación:**

MZC-KZ, 10.5 cm x 15.5cm



**Estándar:** EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento, UE 2016/425

**Composición:** 45%: tela no tejida, 35% tela fundida por soplado, 20% algodón de aire caliente

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

**Aviso de alergia:** Tela no tejida

**Caducidad:** Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

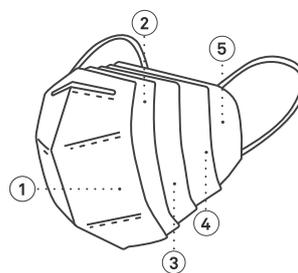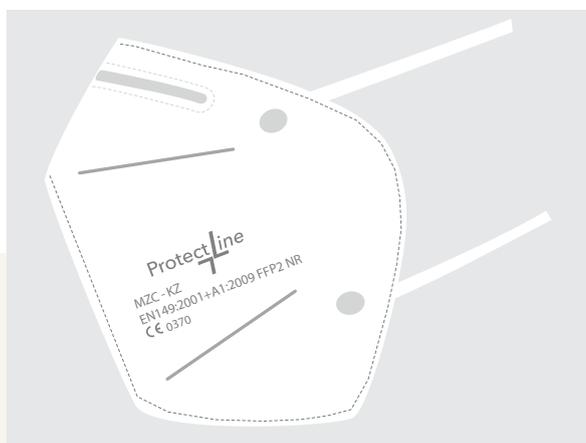

### Composición

- 1., 5. : Tela no tejida
- 2. : Algodón de aire caliente
- 3., 4. : Tela fundida por soplado



FIRMADO POR

# ProtectLine

## INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los equipos NR (No Reutilizable) no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- No estériles.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

### IMPORTADOR:


Developing Business Trading S.L.  
CIF: B-01800127  
Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046 Madrid, España

### FABRICANTE:


Mezorrisson, Edificio1, piso 2, Nro. 8 Calle Tangkeng, Shiyuan Jiedao, Distrito Bao'an, Shenzhen, R.P. China

### REPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Alemania

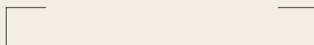

FIRMADO POR

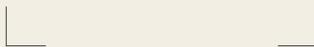

## CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CANTIDAD: 1 ud/bolsa  
SKU: FM-FFP-1-PL-1  
DIMENSIÓN: 165 x 140 mm

CANTIDAD: 20 uds (bolsas individuales)/paquete  
SKU: FM-FFP-20-PL-1  
DIMENSIÓN: 145 x 70 x 170 mm

Caja máster  
CANTIDAD: 20 uds/paquete, 50 paquetes/caja  
TOTAL CANTIDAD: 1000 unidades  
DIMENSIÓN: 760 x 37,5 x 370 mm

## CÓDIGO DE BARRAS



FIRMADO POR

