

ProtectLine

Ficha técnica Mascarilla FFP2 NR Modelo FM0201-966

Mascarilla de protección

≥94% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 2163

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR

Modelo / Especificación: FM0201-966, 20.8cmX18.5cm


Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

Composición: 43%: tela no tejida, 30% tela fundida por soplado, 27% algodón de aire caliente

Condiciones de almacenamiento: Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

Aviso de alergia: Tela no tejida

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

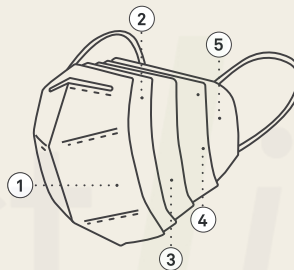

Composición

- 1., 5. : Tela no tejida
- 2. : Algodón de aire caliente
- 3., 4. : Tela fundida por soplado



ProtectLine

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



IMPORTANTE

Los equipos NR* no deben usarse en más de un turno de trabajo.

Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.

No estériles.

Estas mascarillas no aportan oxígeno.

No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.

La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.

Mantener alejada de fuentes de calor.

**No Reutilizable*

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. NB2163 (Anexo V, Modulo B)

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. NB2163 (Anexo VII, Modulo C2)

IMPORTADOR:

Arsh Consultancy and Skyline S.L.

CIF: B45682283

Import license Nr: 8189-PS

Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046 Madrid, España

FABRICANTE:

Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. "JU"

No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua

Zhejiang. R.P. China

FREPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich,

Alemania

ProtectLine

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CANTIDAD: 1 ud/bolsa
SKU: FM-FFP-1-PN-10
DIMENSIÓN: 165 x 140 mm

CÓDIGO DE BARRAS



CANTIDAD: 20 uds (bolsas individuales)/paquete
SKU: FM-FFP-20-PN-10
DIMENSIÓN: 145 x 70 x 170 mm



Caja máster

CANTIDAD: 20 uds/paquete, 50 paquetes/caja
TOTAL CANTIDAD: 1000 unidades
DIMENSIÓN: 770 x 380 x 380 mm

