

Ficha técnica Mascarilla Quirúrgica Modelo FM0501-966

Mascarilla quirúrgica desechable - Tipo IIR

UNE-EN 14683:2019+AC:2019

Según Directiva 93/42/CEE



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla quirúrgica desechable - Tipo IIR

Clasificación: Clase I, Regla I, Según Directiva 93/42/CEE, ANEXO IX

Evaluación de la conformidad: Según ANEXO VII

Modelo: FM0501-966, 17.5cm x 9.5cm

Especificación: Especificación UNE-EN 14683:2019 AC, Tipo IIR

Estándar: UNE-EN 14683:2019 AC

Eficiencia de filtración bacteriana: $\geq 98\%$

Composición: 61.5% tela no tejida, 38.5% tela fundida por soplado


Estructura: cuerpo de la máscara, pinza nasal y agarre de la máscara

Aviso de alergia: Tela no tejida. No estéril

Caducidad: 24 meses bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

COMPOSICIÓN:

Tela no tejida

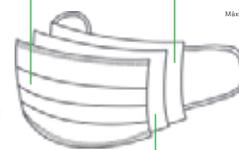

Tela fundida por soplado 98%



Máxima humedad relativa



Rango de temperatura



FIRMADO POR

UNE-EN 14683:2019+AC:2019

CE

ProtectLine

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Para la colocación de las mascarillas quirúrgicas no reutilizables se recomienda hacerlo sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello) y respetando los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con solución hidroalcohólica antes de manipularla
2. Identificar la parte superior de la mascarilla
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal ajustarla
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar la ausencia de las molestias respiratorias
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si es necesario tocarla se debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohól



RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección;
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma;
4. Para desechar definitivamente véase el apartado eliminación de la mascarilla;
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

IMPORTANTE

- Material hipoalergénico, polipropileno y resistente al agua incluyendo la pinza nasal flexible.
- Informe de Ensayos CE emitido por TÜV SUD.
- Condiciones de conservación: Almacenar en lugar con relativa baja humedad, libre de gases corrosivos, bien ventilado y evitando altas temperaturas (>40°C).
- Mascarilla de uso personal
- Duración de uso máximo: Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h, se puede usar varias veces, a condición de que se retire siempre siguiendo las instrucciones.
- No Reutilizable
- Eliminación de la mascarilla: Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.
- En caso de rotura de la mascarilla, ya que esta pierde su eficacia, se deben de seguir de inmediato las indicaciones y procedimientos de actuación que los servicios de prevención de riesgos laborales que cada centro hayan previsto para esta circunstancia.

ProtectLine

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CANTIDAD: 10 uds/bolsa
SKU: QM-MM-10-PL-3
DIMENSIÓN: 270 x 13 mm

CÓDIGO DE BARRAS



CANTIDAD: 5 uds/10 bolsas/caja
SKU: QM-MM-50-PL-3
DIMENSIÓN: 190 x 100 x 90 mm



CANTIDAD: 50 uds/box, 50 boxes/caja
TOTAL CANTIDAD: 2500 unidades
DIMENSIÓN: 50 x 400 x 410 mm



IMPORTADOR

Eupharma Healthcare S.L.
NIF: B14969026, Licencia Previa: 7872-PS
Avd. Apreama 6, Nave 6
14013 Córdoba, Spain

DISTRIBUIDO POR:

Distribuido por Arsh Consultancy & Skyline S.L.
NIF: B45682283
Calle Alfares, 9, 45600 Talavera de la Reina, Toledo, España



FABRICANTE

Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. "JU"
No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua
Zhejiang. P.R. China



REPRESENTANTE EUROPEO

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

FIRMADO POR

UNE-EN 14683:2019+AC:2019

CE