

Ficha técnica Mascarilla FFP2 NR Modelo MZC-KZ(S)

Mascarilla de protección

≥94% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 0370

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR

Modelo / Especificación:

MZC-KZ(S), 12,5cm x 11cm



Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento, UE 2016/425

Composición: 45%: tela no tejida, 35% tela fundida por soplado, 20% algodón de aire caliente

Condiciones de almacenamiento: Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

Aviso de alergia: Tela no tejida

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

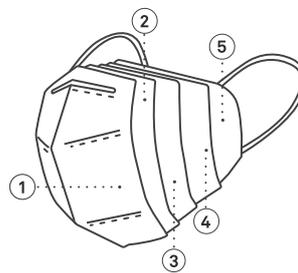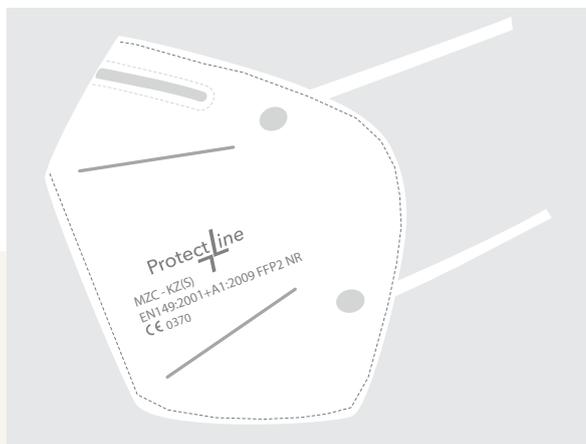

Composición

- 1., 5. : Tela no tejida
- 2. : Algodón de aire caliente
- 3., 4. : Tela fundida por soplado



ProtectLine JUNIOR

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los equipos NR (No Reutilizable) no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- No estériles.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

IMPORTADOR:


Developing Business Trading S.L.
CIF: B-01800127
Alameda Recalde 34, 1 Izquierda.
48009 Bilbao-Bizkaia, España

FABRICANTE:


Mezorrisson, Edificio1, piso 2, Nro. 8 Calle Tangkeng,
Shiyan Jiedao, Distrito Bao'an, Shenzhen,
R.P. China

FREPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich,
Alemania

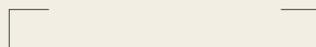

FIRMADO POR

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

ProtectLine JUNIOR

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CÓDIGO DE BARRAS

CANTIDAD: 1 ud/bolsa
SKU: FSM-FFP2-1-PL-1
DIMENSIÓN: 150 x 130 mm



CANTIDAD: 30 uds (bolsas individuales)/paquete
SKU: FSM-FFP2-30-18
DIMENSIÓN: 120 x 125 x 100 mm



Caja máster

CANTIDAD: 30 uds/paquete, 60 paquetes/caja
TOTAL CANTIDAD: 1080 unidades
DIMENSIÓN: 460 x 440 x 440 mm



FIRMADO POR

