

Ficha técnica Mascarilla FFP2 NR Modelo FM0201-966

Mascarilla de protección

≥94% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 2163

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 NR

Modelo / Especificación: FM0201-966, 20.8cmX18.5cm

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

Composición: 43%: tela no tejida, 30% tela fundida por soplado, 27% algodón de aire caliente


Condiciones de almacenamiento: Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

Aviso de alergia: Tela no tejida

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. NB2163 (Anexo V, Modulo B)

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. NB2163 (Anexo VII, Modulo C2)

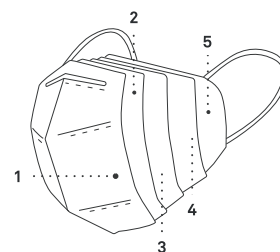

Composición

- 1., 5. : Tela no tejida
- 2. : Algodón de aire caliente
- 3., 4. : Tela fundida por soplado

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



IMPORTANTE

Los equipos NR* no deben usarse en más de un turno de trabajo.

Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.

No estériles.

Estas mascarillas no aportan oxígeno.

No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.

La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.

Mantener alejada de fuentes de calor.

*No Reutilizable

IMPORTADOR:

DBT Developing Business Trading S.L.

CIF: B-01800127 - licencia sanitaria Nr: 8188-PS

Paseo de la Castellana 114, Escalera 4, Piso 4, Puerta 8, 28046 Madrid, España

FABRICANTE:

Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. "JU"

No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua, Zhejiang. R.P. China

REPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Alemania

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CÓDIGO DE BARRAS

CANTIDAD: 1 ud/bolsa
 SKU: FM-FFP-1-NV-11
 DIMENSIÓN: 160 x 135 mm



CANTIDAD: 20 uds (bolsas individuales)/paquete
 SKU: FM-FFP-20-NV-11
 DIMENSIÓN: 140 x 70 x 123 mm



Caja máster

CANTIDAD: 20 uds/paquete, 75 paquetes/caja
 TOTAL CANTIDAD: 1500 unidades
 DIMENSIÓN: 730 x 380 x 380 mm

